



Organical[®] Aligner

Mit dem „FS“ Zweischienekonzept

Information für Zahnärztinnen/Zahnärzte

NEU!

komplettes »Setup-Overview«
* wird bei Aligner Auftrag verrechnet

98€*



RÜBELING+KLAR
DENTAL LABOR

Innovative digitale Behandlungstechnik

Ein modernes Verfahren, das sich seit Jahren bewährt

Die Organical® Aligner Therapie ist in »Steps« unterteilt. Jeder Step besteht aus einem Satz „FS“ Schienen. Die Anzahl der Steps richtet sich nach dem Behandlungsplan, in dem auch die Abstände der Kontrollen festgelegt sind, sodass Sie stets den Behandlungsverlauf im Blick haben.

Hochpräzise, moderne 3D-Technologie und der Einsatz innovativer, mehrschichtiger Folien aus Polyurethan¹ gewährleisten eine kontinuierliche Zahnbewegung und Stabilisierung während der einzelnen Steps.

Organical® Aligner sind transparent und verfügen über eine angenehm glatte, gerade verlaufende »Trimline«, die sich über den Gingivarand erstreckt. Untersuchungen belegen, dass so eine verbesserte Retention gewährleistet und zugleich die Rot-Weiß-Ästhetik gezielt beeinflusst werden kann.²

Organical® Aligner benötigen wenige Attachments und bieten einen hohen Tragekomfort. Gleichzeitig kann bis zu 1/3 der Behandlungszeit eingespart werden.



¹ Polyurethan (PUR) weist stabile Kunststoffe mit vielen quervernetzten Molekülketten aus und ist im Vergleich zu PE je nach Anforderung wesentlich elastischer, mit/ohne Memory-Effekt, langzeitbeständiger gegenüber äußeren Einflüssen, nahezu abriebfrei, bruchfest und verfärbungsresistent.

² Quelle: von Daniel P Cowley "the effect of gingival-margin design on the retention of thermoformed aligner", James Mah und Brendan O'Toole im Journal of Clinical Orthodontics: JCO 11/2012; 46(11):697-702

Mehr als 12 Jahre Erfahrung



Klar
aus Berlin!

TECHNOLOGIE

- 100 % transparent
- 1/3 reduzierte Behandlungszeit
- Mehr Tragekomfort

KUNDENNÄHE

- Persönliche Beratung
- Herstellung in Berlin
- Ratenzahlung



PROFESSIONALITÄT

- Erweiterung Ihres Behandlungsspektrums
- Klinische Betreuung vor Ort
- Umsatzsteigerung in Ihrer Praxis

www.
ruebeling-klar.de



Organical® Aligner aus Polyurethan sind deutlich **beständiger** gegen Plaqueakkumulation. Mit dem **Zweischienenkonzept „FS“** der Organical® Aligner Therapie erzielen Sie für Ihre Patienten einen **höheren Tragekomfort** bei zugleich prozesssicheren, beschleunigten Stellungskorrekturen.

„FS“ steht für einen **14-tägigen** intervallartigen Wechsel zwischen der **Flexibilisierungs-(F-Schiene)** und der **Stabilisierungsschiene (S-Schiene)**.

Unser Workflow zum optimalen Ergebnis

Praxis

Labor

komplettes »Setup-Overview«
* wird bei Aligner Auftrag verrechnet **98€***


Analoge oder digitale Abformung

Sie schicken uns eine konventionelle Alginat- bzw. Silikonabformung oder einen digitalen Scan der Mundsituation Ihres Patienten.



Planungsoptionen

Sie erhalten von uns innerhalb von zehn Tagen das »Setup-Overview« mit einer 3D Simulation. Das »Setup-Overview« wird von Planungsspezialisten erstellt. Die Kosten für das »Setup-Overview« werden bei Auftragserteilung verrechnet.

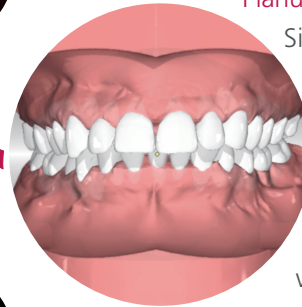

Formular »Freigabe/Bestätigung«

Mit der Planung bekommen Sie das Formular »Freigabe/Bestätigung«. Nach Eingang des Formulars mit Unterschrift und Praxisstempel beginnt die Therapie.




Herstellung der Organical® Aligner

Im Tiefziehverfahren fertigen wir die Organical® Aligner bei uns hier in Berlin für Ihren Patienten.



Kontrolle des Behandlungsverlaufs

Die Kontrolle Ihrer Patienten kann nach jedem Step erfolgen bzw. alle 3 Monate. Das entscheiden Sie je nach Behandlungsverlauf.

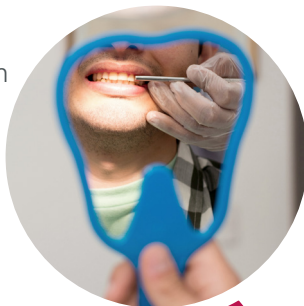

Wir optimieren kontinuierlich unsere Verfahrensabläufe und Protokolle nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Es geht um mehr als gutes Aussehen

Mit Organical® Aligner ist eine Zahnregulierung auch aus medizinischen Gründen empfehlenswert

Organical® Aligner korrigieren leichte bis mittelschwere Zahnfehlstellungen von 5-5.

Sie erleichtern die parodontale Reinigungsfähigkeit, harmonisieren die Funktion und verbessern die Phonetik.

Als präprothetisches Therapiemittel schaffen sie Platz für Implantate/Lumineers/Veneers für weitere ästhetische Versorgungen.



Ihr Aligner Team v. l.: ZT Erik Lauter, Sabine Löchert

Organical® Aligner ist eine innovative und ästhetische Lösung für ein **strahlendes Lächeln**.

Preisübersicht

Organical® Aligner Therapie je Kiefer inkl. Setup-Overview und Organical® Retainer Schiene mit einem Jahr Garantie	Netto	Brutto
Organical® Aligner – leicht <ul style="list-style-type: none"> • Geringfügige Korrekturen von Eng-/Lückenständen • Kleinere kieferorthopädische Rezidive • Behandlungszeitraum bis 5 Monate 	595,00 €	636,65 €
Organical® Aligner – medium <ul style="list-style-type: none"> • Mittlere Korrekturen von Eng-/Lückenständen • Präprothetische/-chirurgische Korrekturen • Rotationskorrekturen bis 20° • Behandlungszeitraum bis 9 Monate 	972,00 €	1.040,04 €
Organical® Aligner – komplex <ul style="list-style-type: none"> • Aufwändigere Korrekturen von Eng-/Lückenständen • Präprothetische/-chirurgische Korrekturen • Rotationskorrekturen bis 30° • Extrusionen bis 2,5 mm • Behandlungszeitraum bis 12 Monate 	1.254,00 €	1.341,78 €
Organical® Aligner Schiene mit aktiven Punkten	59,00 €	63,13 €
Organical® Aligner Schiene mit Power-Grips (Attachments)	59,00 €	63,13 €
Organical® Retainer Schiene (Zweitschiene) Sehr stabile Retainerschiene aus Polyurethan	59,00 €	63,13 €
Retainer (optional) Gebogener Draht. Befestigung mit Composite	64,32 €	68,82 €
3D Retainer (optional) Gefräste Retainer aus Titan. Befestigung mit Composite	216,14 €	231,27 €

Alle angegebenen Preise gelten zzgl. Versandkosten. Die Preise gelten bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Siehe AGB.

Das »Setup-Overview« wird von Alignerspezialistinnen und Alignerspezialisten erstellt.

Ihr Ansprechpartner Labor
 ZT Erik Lauter
 Tel: (030) 54 99 34-360

Praxisbetreuung
 Sabine Löchert
 Mobil: +49 (0)178 68 91 738



Rübeling+Klar Dental Labor GmbH
 Ruwersteig 43
 12681 Berlin
 daten@organical-aligner.de
 info@organical-aligner.de